

Esta férula personalizada terminará o seu desgaste dental noturno e será o início dos seus melhores sorrisos durante o dia.

Foi preparada especialmente para si, tendo sido projetada para as suas necessidades pela mais avançada tecnologia digital.

Para qualquer dúvida consulte o seu dentista.

DIGITAL CUSTOM-MADE MEDICAL DEVICE BY CORUS. HYGIENIZED PRODUCT.

NOBRUX HAS BEEN MADE WITH A CLASS IIA BIOCOMPATIBLE MATERIAL COMPLYING WITH THE ISO10993-1 STANDARD FOR CYTOTOXICITY - SENSITIZATION AND/OR IRRITATION OF THE ORAL MUCOSA.

nobrux

Proteja os seus dentes de noite e sorria todo o dia



NORBUXINSPT_REVO2_211216

Cuide da sua férula em 4 passos

DURANTE OS PRIMEIROS DIAS

É normal que observe alguns destes sintomas:

—
Sensação de pressão.

—
Alterações na fala.

—
Maior salivação.

—
Pequenos arranhões nas áreas de apoio.

—
Numa semana estes sintomas desaparecerão. Se não, consulte o seu dentista.

CONSELHOS

Use protetor labial quando usar a férula.

—
Use o recipiente, o spray e as pastilhas que fornecemos para mantê-la em perfeitas condições.

—
Siga as instruções de uso que fornecemos abaixo.

—
Se cuidar corretamente da férula, conservará a sua eficácia e prolongará a sua vida.

1—Protege Férula

Durante as horas de sono, evita o desgaste inconsciente dos seus dentes provocado pela fricção entre eles devido a patologias como o bruxismo. Ajuda a descongestionar e a manter o seu sistema mandibular mais relaxado.

COMO

Lave os dentes antes de usá-la. Coloque-a no arco dentário segurando-a com os dedos e não a morda até que esteja devidamente no lugar. Para removê-la repita a mesma operação, mas ao contrário. De manhã, escove com um pincel, que só use para esta função, e água. Seque com um pano ou papel absorvente.

QUANDO

Utilize-a de noite.
Limpe-a todas as manhãs.

2—Refresca Spray sabor menta

Proporciona uma intensa sensação de frescura.

COMO

Realize 2 ou 3 pulverizações diretamente na parte interior da férula. De seguida já a pode colocar.

QUANDO

Use todos os dias.
Limpe uma vez por semana.

IMPORTANTE

A água que estiver em contacto com a placa não poderá ultrapassar os 35° C em nenhum destes passos.

3—Guarda NobruXBox

É o ideal para guardar a sua férula durante o dia ou para levá-la numa viagem.

COMO

Atenção! Abra-a deslizando a tampa lateralmente.

Limpe a NobruXBox com água e sabão, usando uma escova ou gaze estéril para evitar que fungos ou bactérias se acumulem no interior da férula.

QUANDO

Use todos os dias.
Limpe uma vez por semana.

4—Higieniza Pastilhas de limpeza

Limparam a férula em profundidade, acabam com os maus odores e proporcionam um agradável sabor a menta fresca.

COMO

Mergulhe uma pastilha de limpeza num copo de água normal. Quando começar a soltar uma solução de borbulhagem azul, insira a férula no copo. Quando a cor azul desaparecer (10 a 20 minutos), remova a férula e lave-a com bastante água. Depois seque e guarde-a na NobruXBox com a zona interna da placa para baixo.

QUANDO

Uma vez por semana.

**Não seguir todas as indicações pode afetar as propriedades do material alterando a cor bem como a adaptação.*