

Deze op maat gemaakte splint maakt een einde aan de nachtelijke slijtage van jouw gebit en is de perfecte bescherming van jouw mooie glimlach.

We hebben deze splint speciaal ontworpen en vervaardigd voor jou, met behulp van de meest geavanceerde digitale technologie.

In elk geval van twijfel, raadpleeg je tandarts.

DIGITAL CUSTOM MADE MEDICAL DEVICE BY CORUS. HYGIENIZED PRODUCT.

NOBRUX HAS BEEN MADE WITH A CLASS IIA BIOCOMPATIBLE MATERIAL COMPLYING WITH THE ISO10993 1 STANDARD FOR CYTOTOXICITY SENSITIZATION AND OR IRRITATION OF THE ORAL MUCOSA.

nobruX

Bescherm's nachts je tanden en lach de hele dag



NORBUXINSNL_REVO2_211216

Verzorg jouw splint in 4 stappen

GEDURENDE DE EERSTE PAAR DAGEN

Het is normaal wanneer je sommige van deze symptomen opmerkt:

- Een drukkend gevoel.
- Storing tijdens de spraak.
- Verhoogde speekselvorming.
- Kleine schaafwondjes op de steunpunten.

Binnen een week zullen deze symptomen verdwijnen. Is dit niet het geval, raadpleeg jouw tandarts.

ENKELE TIPS

Gebruik lippenbalsem wanneer je de splint draagt.

— Gebruik de bijgeleverde houder, spray en tabletten om de splint in perfecte staat te houden.

— Volg het onderstaande gebruikadvies.

Als je de splint goed onderhoudt, behoud je de doeltreendheid ervan en verleng je de levensduur.

1—Beschermen Splint

Vermijd tijdens de slaapuren de onbewuste slijtage van het gebit veroorzaakt door wrijving tussen de tanden als gevolg van aandoeningen zoals bruxisme. Het houdt het kaakgewricht meer ontspannen.

HOE GEBRUIKEN

Poets je tanden voor gebruik. Plaats de splint op de tandboog en houdt deze met je vingers vast. Bijt er niet op totdat de splint goed op zijn plaats zit. Om de splint te verwijderen, herhaal je dezelfde handeling in omgekeerde volgorde. Borstel de splint's morgens met water en een tandenborstel die je alleen voor dit doel gebruikt. Drogen met een doekje of absorberend papier.

WANNEER

Gebruik elke nacht.
Maak elke morgen schoon.

2—Verfrissen Pepermunt smaakspray

Zorgt voor een intens gevoel van frisheid.

HOE GEBRUIKEN

Spray 2 of 3 keer rechtstreeks op de binnenkant van de splint. Daarna kan je het opnieuw aanbrengen.

WANNEER

Voordat je de splint aanbrengt, elke avond.

BELANGRIJK

Het water dat met de splint in contact komt, mag in geen van deze stappen een temperatuur van 35°C overschrijden.

** Het niet opvolgen van alle instructies kan de eigenschappen van het materiaal beïnvloeden, waardoor zowel de kleur als de pasvorm kunnen veranderen.*

3—Bewaren NobruXBox

Dit is het meest geschikte doosje om uw splint overdag in op te bergen. Ook geschikt om mee te nemen op reis.

HOE GEBRUIKEN

Opgelet! Open de NobruXBox door de deksel (zijdelings) opzij te schuiven.

Maak de NobruXBox schoon met water en zeep, gebruik een (tanden)borsteltje of steriel gaasje om te voorkomen dat schimmels of bacteriën zich binnenin de splint ophopen en eraan hechten.

WANNEER

Plaats de splint overdag in de NobruXBox, elke dag.
Maak het eenmaal per week schoon.

4—Reinigen Reinigingstabletten

Deze tabletten reinigen de splint grondig, elimineren onaangename geurtjes en zorgen voor een aangename frisse muntsmaak.

HOE GEBRUIKEN

Leg een reinigingstablet in een glas warm water. Plaats de splint in het glas wanneer er een blauwe, bruisende oplossing ontstaat. Wanneer de blauwe kleur is verdwenen (10-20 minuten), haal je de splint eruit. Spoel de splint daarna grondig met veel water. Droog deze vervolgens af en berg de splint in de NobruXBox op met de binnenkant naar beneden gericht.

WANNEER

Een keer per week