



ES

Instrucciones para el/la paciente

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA RIGHT SMILE



right® Smile

Instrucciones para el/la paciente

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA RIGHT SMILE

Estimado/a Paciente,

¡Gracias por haber elegido Right Smile!

Con el fin de hacer su tratamiento aún más sencillo y completo, hemos querido resumir en este documento las indicaciones que debe seguir para obtener un resultado óptimo. Le recordamos, ante todo, que los alineadores Right Smile solo pueden realizar su función cuando se utilizan correctamente, produciendo pequeños e imperceptibles movimientos en los dientes.

Por ello, su colaboración es fundamental: **deberá llevar el alineador día y noche, retirándolo ÚNICAMENTE durante las comidas y para la higiene oral.**

Por lo general, el alineador que está utilizando **debe sustituirse por el siguiente tras 10- 14 días**, ya que habrá completado su función.

Reducir las horas diarias de uso aumentando el número de días de utilización del alineador **NO** constituye una alternativa válida, sino que compromete la posibilidad de alcanzar el objetivo deseado.

Una vez finalizados los alineadores que tiene en su poder, es importante continuar utilizando el último alineador hasta que reciba instrucciones de su odontólogo, ya sean nuevos alineadores o dispositivos de contención.

De este modo Right Smile le ayudará a conseguir la sonrisa deseada.



Limpieza del alineador Right Smile

- Antes de cada uso, límpielo con un cepillo de dientes, agua fría y jabón.
- No utilice nunca agua caliente, ya que el material del que están fabricados los alineadores puede deformarse con el calor.
- No utilice colutorios para limpiar el alineador, ya que podrían opacarlo o teñirlo, deteriorando su aspecto estético.
- Mientras los lleve puestos, le recomendamos NO beber bebidas colorantes (café, té, vino tinto) para evitar que se manchen.

Los alineadores deben colocarse siempre con los dientes limpios.

Si no tiene la posibilidad de cepillarse los dientes antes de colocar el alineador, utilice nuestra exclusiva espuma Bright (incluido en el kit del paciente): basta con enjuagar la boca con 2-3 aplicaciones de espuma durante 10 segundos y escupirla sin aclarar.

Retirada y conservación de los alineadores Right Smile

- Coloque el alineador en uso en su estuche correspondiente para evitar que se deforme o que sea desechado accidentalmente.
- Conserve los dos últimos alineadores anteriores al que está utilizando actualmente.

- En caso de pérdida o rotura del alineador, póngase en contacto con su ortodoncista; mientras tanto, utilice el alineador anterior.
- En caso de dificultad para la retirada, utilice el extractor específico incluida en el kit del paciente.

Retirada de los alineadores Right Smile

1




En un lado de la boca, presione con la yema del dedo la parte interna del molar posterior para retirar suavemente el alineador de los molares.

2



Repita este procedimiento en el otro lado de la boca antes de extraer completamente el alineador.

3

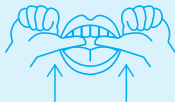

Una vez liberado el alineador de los molares en ambos lados de la boca, podrá proceder a retirarlo suavemente de los dientes utilizando las yemas de los dedos.

En caso de dificultad para la retirada (por ejemplo, uñas largas), utilice el extractor específico incluida en el kit de paciente.







 right® Smile

More about
Right Smile:

QR

 **right**[®] Smile