

De uitneembare prothetische oplossing
in een digitale workflow.

Optima-protocol: Immediaat prothese

OPTIMA

DE UITNEEMBARE PROTHETISCHE OPLOSSING MET MINDER BEZOEKEN

Optima is de uitneembare prothetische oplossing die is ontwikkeld in een digitale workflow.

In slechts een paar bezoeken krijg je alle benodigde informatie van de patiënt en bepaal je het beste ontwerp, waarbij je zorgt voor een esthetische en natuurlijke afwerking.

VOORDELEN



—
Digitaal



—
Geoptimaliseerde
bezoeken



—
Esthetisch



—
Precisie en kwaliteit




—
Voorspelbare
workflow

PACKS

2 — PATIËNTENPACK OPTIMA

Inhoud:

- Definitieve Optima-prothese.
- Mondwater voor een betere mondbescherming.
- Specifieke borstel voor uitneembare prothesen.

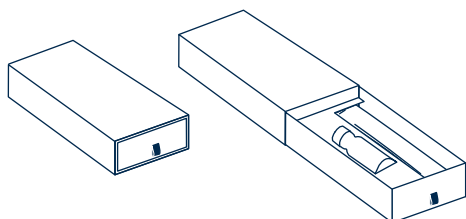

We zijn een maatschappelijk verantwoord bedrijf
en hebben daarom duurzame verpakkingen gemaakt,
waarin we materialen tot een minimum beperken
en gerecyclede en duurzame elementen gebruiken.



Optima-protocol: Immediaat prothese



1STE BEZOEK

SCANNEN

2DE BEZOEK

PROTHESE PLAATSEN

PROTOCOLSTAPPEN
ANALOOG
DIGITAAL

1a→ Mondscan met iOS gevalideerd van antagonist en eventuele betreffende kaak.
1b→ Mondafdruk maken met alginaat.
1c→ Verticale dimensie vastleggen digitaal of analoog.
1d→ Controleer de mediaanlijn.
1e→ Controleer de curve.
1f→ Maak een portretfoto voor realview en zet deze in Corus Link.
1g→ Bepaal de kleur van de tanden en tandvlees.

2→ Orderbon invullen in Corus Link.

3a→ Upload copy denture files in Corus Link.
3b→ Scan bestanden anatomische afdruk uploaden in Corus Link.
3c→ Stuur een anatomische afdruk naar je Corus Lab.

4→ Afbeeldingen uploaden in Corus Link.

1→ Controleer pasvorm en randen met fitchecker.

2→ Indien nodig softliner aanbrengen.

2b→ Controleer esthetische aspecten zoals (mediaanlijn, lachlijn en zichtbaarheid).

3→ Controleer verticale hoogte.

4→ Controleer de occlusie en articulatie.

5→ Vul Corus Link orderformulier in met de benodigde informatie van het eindresultaat.

VEREISTEN EN MATERIALEN

- STL verzenden.
- Afdruk verzenden.
- Orderbon uploaden.

iOS: Trios 3, 4; Itero; Primescan; Medit 700i; Carestream.

Materialen: Alginaat.

- Upload definitieve afbeeldingen en video's.